

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT PAR GARGARISME POUR LE DIAGNOSTIC DE LA COVID-19



S'assurer de ne pas avoir bu, mangé, fumé, mâché de la gomme ou s'être brossé les dents 30 minutes précédant le prélèvement.

1



- Se laver les mains
- Jeter votre masque et se laver les mains à nouveau
- Désinfecter la surface de travail et préparer le matériel
- Verser l'eau contenue dans le tube vers le gobelet fourni

2

Se gargariser avec cette eau



2X

5
sec

5 secondes
dans la bouche

5
sec

5 secondes
dans la gorge

3



- Recrachter le contenu dans le gobelet
- S'assurer que votre prélèvement répond aux critères :
 - au moins 2 ml de liquide
 - absence de corps étrangers

**sinon, attendre
30 minutes avant
de reprendre votre
prélèvement**

4



- Transvider le contenu du gobelet vers le tube vide fourni comportant la mention « G »
- Revisser le bouchon fermement et désinfecter le tube
- Déposer le tube sur la surface de travail et laisser sécher pendant 60 secondes
- Se laver les mains

5



- Apposer l'étiquette identifiée à votre nom sur le tube de prélèvement selon la méthode démontrée sur l'image
- Déposer votre prélèvement dans la glacière
- Jeter le matériel et désinfecter la surface de travail
- Se laver les mains et mettre un nouveau masque