

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS D'HYDROTHÉRAPIE

Baignoires standards, civières-douches, douches, chaises-leviers et toiles

ÉTAPE 1: NETTOYAGE DE TOUTES LES SURFACES ET LES ACCESSOIRES



1. Vider la baignoire



2. Laver vos mains



3. Mettre l'équipement de protection individuelle (EPI)



4. Rincer



5. Appliquer le produit



6. Frotter avec un linge en microfibre, incluant le dessous de la chaise



7. Rincer



8. Placer le linge en microfibre souillé à l'endroit désigné

ÉTAPE 2: DÉSINFECTION DE TOUTES LES SURFACES ET LES ACCESSOIRES



1. Appliquer le produit



2. Frotter avec un linge en microfibre, incluant le dessous de la chaise



3. Laisser agir
1 MINUTE
le produit prêt à l'usage | **5 MINUTES**
le produit provenant du dilueur




4. Rincer



5. Sécher les surfaces avec un linge en microfibre sec



6. Placer les linges en microfibres souillés à l'endroit désigné

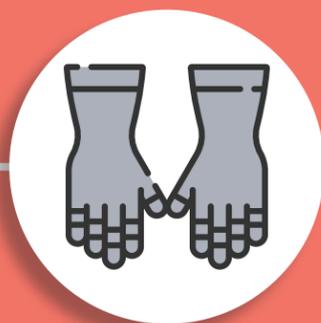

7. Retirer l'EPI



8. Laver vos mains

